

3shape 

TRIOS[®] wireless

무선스캔의 자유로움



DIO IMPLANT

TRIOS® 와 함께 하는 지속적인 향상

TRIOS® 구강 스캐너를 이용하여 환자에게 더 나은 환경을 선사하고 진료 시간을 단축하며 폭넓은 치료 기회를 제공할 수 있습니다. TRIOS®는 빠르고 사용이 간편하며 정확히 표현된 디지털 이미지를 만들어 냅니다. 다른 솔루션과 달리 TRIOS®는 꾸준한 소프트웨어 업데이트, 업그레이드 가능한 하드웨어 및 선택적 치과 치료 모듈을 제공하여 항상 변화하고 발전하는 치과 환경을 약속합니다.

디지털 구강 스캔이 필요한 5가지 이유



환자 경험 및 편의 개선



시간 절약 및 더 많은 환자 보기



Impression 재료 및 배송 비용 절감



정확도 개선 및 수작업 오류 제거



쉬운 촬영 지원 및 재촬영 최소화

무선스캔의 자유로움

새로운 Trios 3 wireless는 Trios 3와 동일한 Insane speed와 정확도를 가지고 있으며 시장에서 가장 앞선 기술들을 기반으로 5년 연속 Best of class award에서 수상을 하고 있습니다.



TRIOS® 를 선택해야 하는 이유

환자에게 더 나은 치료 환경 제공

쉽고 빠르며 정확하고 사실적인 Color 구현

다양하고 효율적인 활용

다양한 활용 범위를 가지며 Open System이라 기공소와 당일 작업이 가능


치과의 성장

새로운 치료 옵션으로 서비스 확대 및 수익 증대


검증된 정확성

최적의 치료 효과를 위한 검증된 정확성

New Software 3Shape TRIOS Design Studio

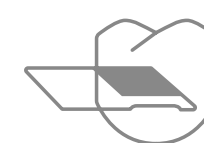

SCAN

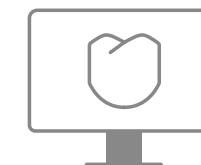

DESIGN




MILL

개방적이고 단순한, 그리고 유연한 원데이보철을 위한 최적의 소프트웨어

순서대로 쉽게 디자인하고 밀링할 수 있도록 최적화된, 원데이보철 솔루션을 드립니다. 이 소프트웨어는 마진설정도 아주 정확하게 할 뿐만 아니라, 심미적인 보철의 모양도 자동으로 디자인합니다. Crown, Inlay, Bridge, Veneer 등 다양한 보철의 디자인이 가능하며, 곧 출시될 Screw Retained Crown의 보철 디자인도 Design studio를 통해 만날 수 있습니다.

환자에게 더 나은 치료 환경 제공

쉽고 빠르며 정확하고 사실적인 Color 구현으로 환자에게 감동 선사

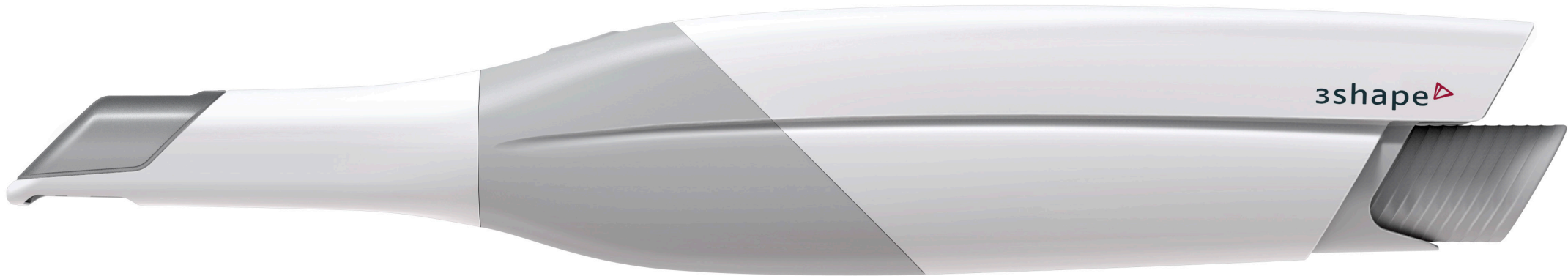


빠르고 편안한 환경

치과 의사와 보조 의료진은 TRIOS®를 통해 쉽고 빠르게 스캔하여 환자에게 가장 적합하고 편안한 진료 환경을 제공하고 진료 시간을 단축할 수 있습니다.

"환자들은 아날로그 방식보다 3D 구강 스캔을 더 선호합니다."

Chalmers et al, 2015년 12월
Dr. Beatrice DMD, New York, USA

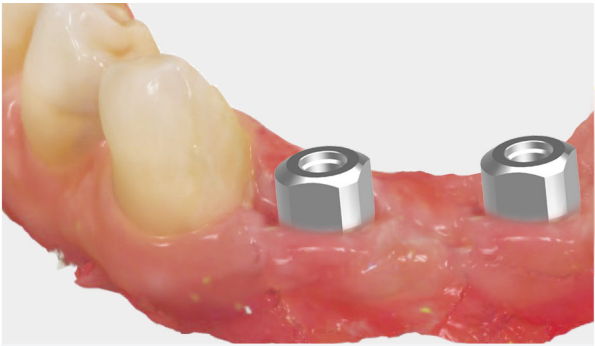

검증된 정확도

최적의 치료 결과를 제공하게 됩니다.
3Shape TRIOS®는 대학 등의 기관에서 비교 연구를 통해 Full Arch뿐 아니라 Single, Bridge에서 뛰어난 정확도가 검증되었습니다.

"TRIOS® 정확도는 최고 수준이며 훌륭한 치과진료를 위해 없어서는 안 될 도구입니다."

Ramsey A. Amin, D.D.S, Los Angeles, USA




RealColor™ 스캔

RealColor 구현으로 뛰어난 품질의 디지털 이미지를 만들어 정확한 진단과 환자와의 소통을 개선합니다.

"자연스러운 Color를 지원하여 효율적인 치료를 위한 진단이 가능합니다. 의사, 직원, 환자 모두가 좋아합니다!"

Dr. Jonathan L. Ferencz, Prosthodontist, New York, USA

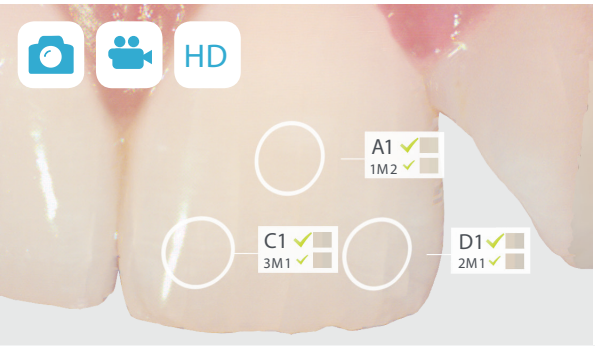

기본으로 제공되는 디지털 기능

셰이드 측정, 상세하게 볼 수 있는 HD 사진, 측면까지 보여주는 구강 카메라 기능을 갖추고 있습니다.
대학과 공동으로 실시한 최근 연구에서 TRIOS® 셰이드 측정이 인간의 눈보다 정확하다고 밝혀졌습니다.

Gotfredsen et al, 2015년 4월

다양한 옵션 이용

활용도와 예산에 따른 스캐너 및 소프트웨어 선택

1. Color / Mono 스캔 선택

TRIOS® 3



RealColor™, 셰이드 측정 및 구강 카메라

TRIOS® 3 Mono



흑백 텍스처 솔루션

2. Pen / Handle 그립 선택



Pen 그립



Handle 그립

3. Cart / Pod 설정 선택



멀티 터치 화면과 이동이 가능한 올인원 솔루션



가볍고 휴대가 용이하며 USB를 통해 노트북에 연결

치과의 성장

TRIOS®는 입증된 CAD/CAM Work Flow를 통해 가장 광범위한 적응증을 제공합니다.




Crown



Bridge



Veneer, Inlay 및 Onlay

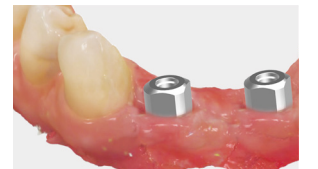

Abutment, Implant Bridge 및 Bars



Temporary Crown 및 가상 진단 왁스업



Post 및 Core



가철식 국소 의치



DIO ORTHOnavi.

Add on 소프트웨어 모듈을 통한 다양한 진화

SMART Application 1 Fully Digitalized Surgical Guide

디지털 Implant 시스템은 디지털 진료 프로세스로 3D 사전 모의시술과 Surgical Guide를 이용하여 정확하게 Implant가 식립되고 디지털 보철물이 제작되어 항상 일률적이고 안정적인 시술 결과를 나타냅니다.



SMART Application 2 Digital Prosthetic System

디지털 보철 시스템 도입으로 진료 절차 간소화 및 시간 절약을 통한 프로세스의 간소화로 진료의 편의성과 환자들에게 치과의 만족도를 높이는 강력한 경쟁력을 갖출 수 있습니다. Oneday 보철(당일 수복 보철)을 통해 내원 당일 치료를 끝낼 수 있습니다.



SMART Application 3 Digital Ortho System

치과 내에 석고모형을 보관하여 비용과 공간에 제약이 많았던 예전과는 달리 스캔된 파일을 컴퓨터에 저장함으로써 훨씬 더 깔끔한 진료환경을 만들 수 있으며 디지털 교정시스템으로 간단한 교정 또는 심미 치료의 마무리 교정작업을 손쉽게 할 수 있습니다.



DIO Digital SMART Solutions

SMART Solution 1 Trios 3 & DIO Digital SMART Solutions

가장 업그레이드된 구강용 스캐너인 Trios 3와 Software, 보철물 제작을 위한 밀링장비까지 최상의 치과용 디지털 스마트 솔루션으로 진료 시스템을 구축하여 스마트한 진료가 가능합니다.

SMART Solution 2 Digital Implant System, UF(II)

다양한 골질에도 우수한 초기 고정력을 확보하고, HSA 표면처리로 임플란트 주위염을 예방하는 UF(II) HSA 임플란트와 디지털 보철 솔루션인 H-Scanbody, Digital Abutment, 기성 Abutment에 대한 Library화를 통하여 진료의 편의성과 효율성을 높일 수 있습니다.

SMART Solution 3 Digital Implant, DIONavi. & SMARTnavi.

DIONavi.는 교합과 응력분산까지 고려한 3D Implant Planning을 통하여 임플란트 시술의 정확도가 높아지고 환자분의 편안함과 술자의 시술에 대한 자신감을 제공해 드립니다. 끊임없이 진화하고 있는 DIONavi.는 Digital Service Platform SMARTnavi.를 통해 환자 상담에서부터 주문, Planning 및 Confirm까지 보다 스마트한 진료 환경을 제공해 드릴 것입니다.

DIO Digital SMART Service Pack

Safety

Quality Care & Service

Before Service

- 1 / 설치 장소 사전 방문
- 2 / 사용 용도에 따른 맞춤형 설치
- 3 / 전력량 확인
- 4 / 설치 공간 확인
- 5 / 인터넷 환경 확인
- 6 / 설치 당일 장비 이동 동선 확인

Regular Care & Management

- 1 / 정기 방문 점검
- 2 / CS 사전 해결
- 3 / 소프트웨어 업데이트 및 노하우 전수

Speed

Call Center & After Service

Call Center

- 1 / 유저 전용 Call center 운영
- 2 / 1day (24시간 내) CS 처리 시스템
- 3 / 제품사용, 유지, 관리 서비스 등
- 4 / 원격 조정 문제해결 요청 등

긴급 AS 출동

- 1 / 각 지역별 전문 엔지니어 상주
- 2 / 24시간 내 문제 해결 가능

Smart

Education & Seminar

User EDU Program

- 1 / 자체 교육센터 운영
- 2 / 주중 2일 집중교육
- 3 / 설치 후 상주교육
- 4 / 최대 5일간 집중교육

DIO Digital Solutions Seminar

- 1 / 치과 의사 대상의 유저세미나
- 2 / 기공사 대상의 유저세미나
- 3 / 스텝 대상의 유저세미나

Because accuracy matters Results from American Dental Association study

Trueness (accuracy) Deviation between reference dataset and intraoral scans	
3Shape TRIOS®	6.9 ± 0.9 μm
Carestream CS 3500	9.8 ± 0.8 μm
iTero®	9.8 ± 2.5 μm
3M™ True Definition	10.3 ± 0.9 μm
Planmeca PlanScan®	30.9 ± 10.8 μm
Sirona CEREC Omnicam	45.2 ± 17.1 μm

TRIOS®와 Sirona CEREC Omnicam, Planmeca PlanScan간 Single Crown에 대한 구강 외 테스트에서 3Shape의 TRIOS®가 가장 정확한 구강스캐너임이 확인되었습니다.

American Dental Association
University of Freiburg, Baltimore College of Dental Surgery
Hack and Patzelt, ADA Professional Product Review, 2015

3Shape TRIOS®와 3M™ Lava™ C.O.S., iTero, Sirona CEREC Omnicam간 구강 내 Quadrant 디지털 인상 테스트에서 3Shape TRIOS®가 가장 정확한 구강 스캐너 중 하나로 확인되었습니다.

University of Zurich
Ender et al, Clin Oral Investig, 2015


3Shape TRIOS®와 Sirona CEREC Bluecam, Sirona CEREC Omnicam, 3M™ Lava™ C.O.S., 3M™ True Definition 및 iTero 간 구강 내 Full Arch에 대한 테스트에서 3Shape의 TRIOS®가 가장 정확한 구강 스캐너 중 하나로 확인되었습니다.

University of Zurich
Ender et al, J Prosthet Dent, 2015

3Shape TRIOS®와 Sirona CEREC Omnicam 간 구강 내 싱글 치아 수복물에 대한 테스트에서 3Shape TRIOS®가 Sirona CEREC Omnicam보다 더 정확한 구강 스캐너임이 확인되었습니다.


University of Giessen
Boeddinghaus et al, Clin Oral Investig, 2015

구강스캐너를 활용한 솔루션

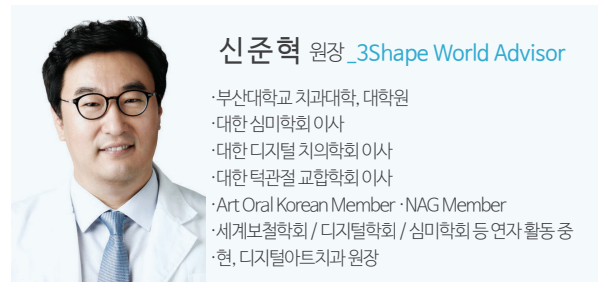

구강스캐너는 1980년 스위스 취리히 대학의 Prof. Werner Mormann and Marco Brandestini 에 의해서 개발 되었습니다. 개발 당시에는 CEREC이라는 습식 가공을 하는 밀링기와 함께 붙어있는 Inoffice SYSTEM, 즉 치료실내 장치였습니다. 그 후 디지털 기술이 발전하면서 여러 구강스캐너가 발전을 거듭하게 되었고 밀링기와 함께 나오는 경우도 있지만 밀링기와는 별도의 형태로 나오게 되었습니다.

구강스캐너는 최근 컬러 형태와 동영상 방식으로 발전했습니다. 거의 대부분의 회사가 구강스캐너를 하나의 밀링기가 아닌 여러가지의 밀링기와 호환이 되도록 제작한 것 같습니다. 현재의 구강스캐너는 광학 인상장치로 입안의 대상물의 표면을 복사해오는 장치로 인식되고 있습니다. 기존의알지네이트나 고무인상재는 먼저 구강안의 구조물을 일정 시간 동안 인상재가 경화되기까지 기다려 음형으로 본을 뜨고 이에 stone을 붓고 석고 모형을 만드는 과정을 거치는데 반해 구강스캐너는 빛을 이용하여 스캔을 통해서 양형의 본을 뜨고 이에 데이터를 직접 이용하거나 3D 프린터로 모형을 만드는 과정을 거치게 됩니다.

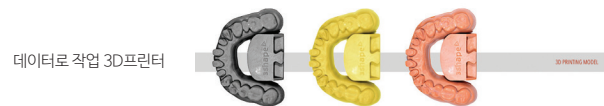

구강스캐너는 다음의 2가지 과정으로 발전하고 있습니다.

1. 데이터로 작업을 하는 과정
 2. 3D 프린터로 기존의 석고모형을 대체하여 작업하는 과정
- 사실 3D 프린터의 발전 상황과 비용적인 측면에서 위의 2가지 방식에서 각각의 상황에 따라 적용되고 있습니다. (필자의 경우 현재 지르코니아 보철 작업이나 임플란트 가이드 시술시 데이터로 작업을 하고 있습니다만 3D 프린터의 발전 상황에 따라 분명히 임상적용에 많은 변화를 줄 것이라 기대하고 있습니다.)
- 또 포세린을 빌드 업을 해야 한다거나 골드 크라운 등의 아날로그 보철을 적용할 경우에는 당연히 데이터로 작업할 수 없으므로 3D 프린터 모델을 사용해야하나 정밀성 문제와 비용적인 측면에서 사용하기에는 제약이 있는게 사실이며 점차 많은 개선으로 곧 많은 변화가 있으리라 생각합니다.

제가 생각하는 구강스캐너의 활용도는 다음과 같습니다.

1. 예비 인상과 진단 모형 제작
2. 보철 제작
3. 임플란트 가이드 제작
4. 교정

1. 예비 인상과 진단 모형 제작

환자가 처음에 내원 시 진단과 상담을 함에 있어 아주 큰 활용도가 있습니다. 특히나 데이터로 저장이 되는 디지털의 특성상 모형 저장 공간이 따로 필요가 없고 필요 시 금방 해당 파일을 찾기도 용이 합니다. 최근 점점 치과에서 전자 차트를 많이 도입하고 있는데 이와 비슷한 상황입니다. 치과 내 여러 공간에서 다양한 사람들이 언제든지 찾아볼 수 있는 장점이 있고 또 이를 환자와 함께 3차원적인 그림으로 쉽게 설명할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 특히 임플란트와 심미보철 치료, 교정 치료 시 환자에게 앞으로 변화될 진행 과정에 대해 보다 자세하고 쉽게 설명할 수 있습니다.



상담 시 환자와의 커뮤니케이션 과정에서 디지털 가상 진단 모형을 통해 디지털 임플란트 가이드 수술과 기성 어버트먼트를 계획하고 완성될 보철 형태를 미리 설명할 수 있으며 임시치아를 미리 만들 수도 있습니다.


2. 보철 제작

고정성 보철의 경우, 3D 프린트 모형을 사용하여 고정성 보철의 가철성 보철까지 활용할 수 있고 아날로그로 해왔던 모든 보철을 제작 할 수 있습니다. 하지만 이는 향후 많은 발전이 필요하다고 생각하며 필자의 경우 현재는 캐드캠으로 제작 가능한 지르코니아, PMMA 임시보철과 글래스소재, 하이브리드 소재들을 데이터로 작업하고 있습니다.

데이터로 작업시 처음에는 여러 맞출을 위한 영점 조정 작업이 필요합니다. 하지만 한번 구현하고 나면 그 다음부터는 일정하게 결과를 낼수 있다



는 디지털의 장점이 있습니다. 우리가 임상에서 흔히 사용하는 교합지를 통해 치아에 교합점을 찍게 되는데 컬러 스캐너의 경우 이를 컬러를 통해 그대로 인기해낼수 있습니다. 특히 인접치에 적용하여 가상 교합기에 마운팅시 활용하면 아주 좋은 결과를 가져올 수 있고, 캐드상에서 크라운을 디자인 할 경우 교합점을 표현할수 있는데 이를 통해서 실제 의도한 교합점과 구강내 결과를 비교하기가 용이합니다. 저는 진료실에서 스마트 폰 등의 기기를 이용하여서 카카오톡같은 SNS를 통해서 CAD 디자인한 것과 구강내와 직접 비교를 하기도 합니다. 특히 교합점등은 비교하기가 아주 수월하고 아날로그에서는 교합기를 들고 일일이 교합점을 찍어서 비교해야하는 등 적용에 어려움이 있었으나 디지털기기를 통해 치과 의사 입장에서 임상에 큰 도움이 되고 있습니다.

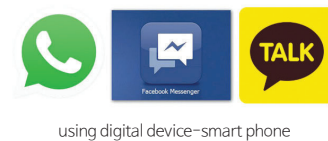


아날로그에서 임프레션 과정을 잘하기 위해서는 많은 노력이 필요합니다. 기성트레이 또는 개인 트레이를 잘 선택 제작해야하고 정확한 믹싱 또는 세팅타임이 지켜져야하며 적용 방법 또한 아주 중요합니다.

디지털 구강 스캐너 역시 그런 관점에서는 몇가지 고려사항이 있습니다. 정확한 임프레션이 나오기 위한 구강내 환경을 조성 해야 하는데 보다 주의력 있는 프랩과 일반적으로 구강스캐너가 광학 방식이므로 반사가 되지 않도록 신경 써야하고 구강내 침이나 습윤한 환경을 최대한 피해야 합니다. 그리고 가능한 흔들림이 없이 천천히 그리고 여유있게, 충분히 스캔이 되도록 스캔 테크닉을 습득해야 합니다. 디지털 역시 기기도 중요하지만 더욱 중요한 것은 임상가라고 생각합니다.

3. 임플란트 가이드 제작

CBCT 촬영을 통해서 심부의 해부학적인 구조물들을 얻고 여기에 더해서 구강스캐너를 활용하여 환자 구강내의 표면의 인상을 채득하고 이 2가지를 합쳐서 3D캐드상에서 임플란트의 위치나 임시보철물의 디자인을 하고 디지털 가이드 스텐트를 3D 프린터로 만들게 됩니다.

보다 직접적인 과정들을 통해서, 보다 정확한 결과를 얻게 되는 과정으로 디지털 임플란트 수술에 있어서 전 세계 여러 의사들이 많은 관심을 가지고 있고 많은 적용을 하고 있으며, 디오에서 제공하고 있는 디오나비(DiOnavi.) 시스템은 전세계 치의들을 통해 3만여 이상 케이스가 진행되어 치과 치료의 새로운 패러다임을 만들어 가고 있습니다.

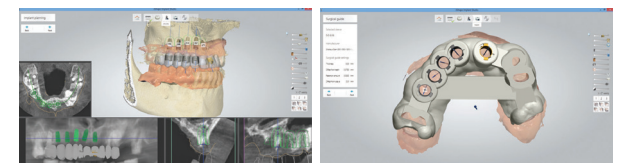


디오나비 가이드 디자인

4. 교정

디지털 교정은 3D 디지털 셋업을 통해 투명교정장치를 만들거나 환자 개개인 맞춤형 브라켓을 제작하는 등 보다 편리한 방법들이 개발되고 있습니다. 앞으로 교정분야에서 구강스캐너가 많은 적용과 발전이 기대되며, 최근 디오에서 출시된 디지털 교정시스템(DIO ORTHOnavi.)을 통해 환자에게는 심미적 안정감을 제공하고, 술자에게는 보다 쉽게 진료범위를 확대할 수 있는 기회가 될 것으로 기대됩니다.

특히 기존의 교정 진료를 위해 만들어진 석고 모델에 대한 보관을 데이터의 보관만으로 가능하게 되어 공간 제약에 대한 해소와 언제든지 쉽게 Data접근을 통해 효과적인 유지관리가 가능해 질 것입니다.

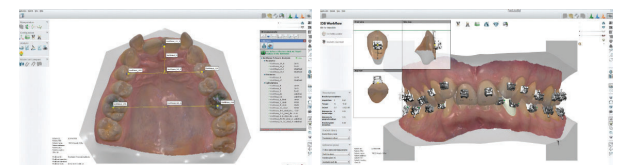

디지털교정

Digital SMART Dentistry로의 전환

이렇게 많은 치과의 Key는 디오입니다.

경기,인천지역

서울 팀 치과
에본플란트 치과
서울플러스 치과
에그린 치과
미보스톤 치과
안양 연합 치과
이편한 치과
이플라치 치과
임플란티어 치과
삼성리움 치과
김경남 치과
ABC 치과
햇살좋은 치과
퍼시지 치과
내손 치과
시흥 치과
웰 치과
부곡 치과병원

아이엠 치과
원 치과
현대 치과
서울중앙 치과
자연에 치과
센트럴정원 치과
하늘정원 치과
서울에스 치과
미소 치과
서울그레이스 치과
에 치과
보스톤수지 치과
정감 치과
엔세린 치과
임플란트 치과
코스모스 치과
이숨 치과
미사온아 치과

담덕 치과
서울 샤 치과
박선희 치과
정플란트 치과(부천)
정플란트 치과(구월)
정플란트 치과(간석)
연세선 치과
에이치 치과
에스 치과
도화 굿모닝 치과
조은내일 치과
화인 치과
에스 치과
신세계정원 치과
타임 치과
정원 치과
연세위드 치과
길 치과

금촌뿌리사랑 치과
운정뿌리사랑 치과
용인 보스톤 치과
치아나라 치과
미소애 치과
더서울 치과
연세우리 치과
에림 치과
미시간 치과
닥터함 치과
마송제일 치과
서울 S 치과
모아 치과
남양주 온아 치과
맑은우리 치과
임플란티스 치과

서울지역

연세미래엔미소 치과
태미안 치과
서울 완수 치과
서울 탑 치과
좋은 치과
이대 목동병원
페리오플란트 치과
튼튼플란트 치과
연세대학교 교정
원데이 치과
에쁜사람 치과
보스톤클레스 치과
하루미소 치과
경희대학교 병원

치과수영 정플란트 치과
광진 정플란트 치과
양지바른 치과
미켈란 치과
서울조영민 치과
연세유라인 치과(가
락)
연세유라인 치과(신
림)
연세플라워 치과
서울프라임 치과
고려대학교 병원
디자이언 치과
연세 고운미소 치과
스탠다드 치과
스노우하이트 치과

베스트e 치과
우리모두들 치과
미시간 치과
올리브나무 치과
행복드림 치과
닥터플란트 치과
천호 플플란트 치과
서울파스트 치과
필립포스 치과
라임나무 치과
울곧은 치과
덴타피아 치과
디자이언스타 치과
조은미소 치과
퍼스트 치과
아이엠 치과

이포유 치과
더밝은 치과
세라믹 치과
따뜻한 치과
투명 치과
이즈 치과
미유 치과
유 치과
웰 치과
크림 치과
라운 치과
아산 병원
다움 치과
맑은 치과
와이즈 치과

강원지역

최치은 치과
윤석만 치과
부부 치과(원주)
하나 치과
보스톤 치과
원주대학교 보철과
세브란스 기독병원
송재용 치과
김영근 치과
춘천 부부 치과

원일 치과
안경민 치과
미 치과
현대 치과
대호 치과
우리가족 치과
치과의 정석 치과
이숨 치과

대구,경북지역

닥터스 치과(대구)
삼성연합 치과
늘사랑 치과
아세아 치과
사과나무 치과
마이스터 치과
미시건 치과
램프란트 치과
이레볼꽃 치과
강북 볼꽃 치과
이사랑연합 치과
대구가톨릭대 의료원
불꽃 치과

엑스 치과
한진옥 치과
W 치과
광 치과
동산 치과
손희용 치과
킨스 치과
보은 치과
승원 치과
타임 치과
라운 치과
스마트 치과
장아연합 치과

울산·포항지역

서울박 치과
CK 치과(남구)
CK 치과(동구)
이종은 치과
이스타 치과
서울탑 치과
로덴 치과
이&이플란트 치과
허브 치과
한일 치과

e맑은 치과
박상영 치과
온양 치과
삼부 치과
타임 치과
미담 치과
필립 치과
엑스 치과
이광우 치과
방글원 치과

대전,충청지역

서대전엔터피아 치과
영플란트 치과(천안)
보스톤 치과(아산)
임플란티어 치과
엠플란트 치과
조영민 치과
램프란트 치과
서울플란트 치과
바른명 치과

수 치과
이엘 치과
경희 치과
본 치과
서울치과병원
인플란트 치과
온아 치과
새롭답 치과

전북지역

성모 치과
노블리안 치과
우리미소 치과
공설 치과
누가 치과
우석 치과
탑플란트 치과
아름다운 치과

심플란트 치과
엘리 치과
휴부부 치과
미소진 치과
나온 치과
보가치과
행복한 치과
백세플란트 치과

광주,전남지역

예담 치과
곽재우 치과
조선대학교 치과병원
정문 치과
신세계 치과
행복나눔 치과
전남대 교정과
해맑은 치과
대학 치과(진월)
대학 치과(수완)

한결 치과
나무 치과
심플란트 치과
하이 치과(광주)
러브미 치과
온누리 치과
미르 치과
즐거운 치과
문장 치과

경남지역

굿스마일플란트 치과(장유)
굿스마일플란트 치과(진영)
유어스 치과
부산대학교 병원
뷰티플란트 치과
타임 치과(덕계)
미르 치과(거제)
미르 치과(통영)
제일 치과
파티마병원 치과
정 치과
메디칼 치과
서울 미 치과
현대 치과
오병호 치과

내외에플 치과
강남웰 치과
세인 치과
한일 치과
케이플란트 치과
온 치과병원
우리가족 치과
인플란트 치과
유폴러스 치과
하나 치과
루아 치과
다움플러스 치과
서울하얀나라 치과
미소하나 치과

박민생 치과
미소을 치과
강 치과
윌 치과
참조은 치과
미소가득 치과(창원)
오복 치과
서상미 치과
거제 뉴욕 치과
변 치과
보스톤 치과(진주)
새서울 치과
새하얀 치과
윌 치과

부산지역

장동수 치과
세계로 치과병원
WS 치과
신호원 치과
웰컴 치과(남포)
웰컴 치과(남진)
웰컴 치과(동구)
굿윌 치과(덕진)
굿윌 치과(서면)
굿윌 치과(하단)
미래 치과
올라잇 치과
세종 치과
사과나무 치과
민트부부 치과
연세 치과(가야)
윤진태 치과
선템타워 치과

미시간 치과
W치과
본 치과
안호경 치과
뿌리섬 치과
명성 치과
플라워 치과
이상국 치과
아름다운 이 치과
워너비 치과
심플 치과
CS연합 치과
로덴 치과(수영구)
로덴 치과(영도구)
로덴 치과(동래구)
서울프라임 치과
e웰니스 치과
뉴욕 치과

예 치과
예인 치과
대연혁신 치과
수 치과
라임업 치과
구절인 부부 치과
선템프라이덴 치과
프렌드 치과
엑스 치과
에이스 치과
유 치과
인플란트 치과
보스톤 치과
밝은미소 치과
이종은 치과(동래)
이종은 치과(하단)
강순일 치과
스마트드 치과

연세비엔이 치과
예담 치과
라임부부 치과
엘리트 치과
오오 치과
선한이웃 치과
하이 치과
디지털아트 치과
유엔아이 치과(진구)
유엔아이 치과(연제구)
유엔아이 치과(동구)
워싱턴 치과
메디스 치과
뷰티플란트 치과
MS 치과

아직 망설이고 계시나요?

디오 Dental Clinic Consultant가 변화시켜 드립니다.

디오임플란트 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 66

COSDAQ

서울지점 02-2274-2850
수원지점 031-244-2885
인천지점 032-515-2878
강원지점 033-765-2809

대전지점 042-255-2804
전주지점 063-244-9654
광주지점 062-384-2822
대구지점 053-321-2806

울산지점 052-256-2177
경남지점 055-270-5228
부산지점 051-745-7810
제주지점 055-270-5228

DIO IMPLANT

www.dio.co.kr